

かつらのお手入れについて

かつら（ウィッグ）に欠かせないのがお手入れです。

お手入れをしていただく事で長く・綺麗にウィッグを保つことができます

定期的なお手入れ

アンベリールの医療用かつらは、長期使用を前提に作られています。長く使用していると汚れや匂いが気になられたり、パサつきが発生し、乾燥気味になる場合がございます。

そのような場合は、下記でご紹介するお手入れ方法でお願いいたします。正しい方法で、定期的にお手入れいただくことで、より長期的にご利用いただくことができます。

1



「下準備」

医療用かつらを簡単にブラッシングして、大きなホコリなどをはらいます。

2



「ウィッグを浸す」

洗面器や底の深い容器に専用シャンプーを溶かし、軽く泡立てた水へ浸します。

3



「シャンプー」

汚れが浮いてきたら軽く押し、汚れを落とします。この時ブラシは使用しないでください。手のひらでゆっくり整えるように洗います。


4



「トリートメント」

すすぎ終わったら、専用トリートメントを適量入れた水に2～3分つけ、その後軽くすすぎます。

5

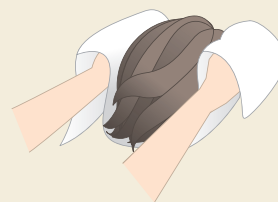

「水気を取る」

吸水性のよいタオルでウィッグを軽く包み、水気を切ります。

6



「スタイル調整」

襟足にあたる部分を持って軽く振ると、カールやウェーブが戻ります。

7



「乾燥」

ウィッグが半乾きの状態で、軽くスタイリングします。
そのあと、ウィッグを自然乾燥（陰干し）させてください。
（ウィッグスタンドを使うと型崩れせず、乾燥・保管することができます）